

FICHA TÉCNICA

ARES BAC – 330 HP

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

REGISTRO/MS nº 25351.187331/2016-19

ARES BAC 330 HP – é destinado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em hospitais, clínicas médicas, ambulâncias, consultórios, etc.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido Límpido Transparente.

COR: Translúcido / Incolor.

ODOR: Sem Perfume, Característico da Matéria Prima.

Densidade Aparente a 25°C: 1,00 g/cm³ até 1,02 g/cm³.

pH a 100% - In Natura: 5,50 a 7,50.

MODO DE USAR:

ARES BAC – 330 HP: Desinfecção: Diluição de 1:50 (1 parte de produto para 49 partes de água).

Desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto deixando em contato por 10 minutos.

Desinfecção de Artigos Não Críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no produto deixando-os umedecidos por 10 minutos. enxaguar e secar os artigos e utilizá-los o mais breve possível.

As informações desta Ficha Técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

DADOS DE SEGURANÇA:

Utilize luvas, óculos e equipamentos de proteção individual. Não utilizar para a desinfecção de alimentos. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Restrito ao uso profissional. Impeça o contato do produto concentrado com os olhos e pele. Em caso de ingestão não provoque vômito. Evite inalação do produto. Em caso de contato direto lavar os olhos e partes atingidas com água corrente, persistindo procurar serviço de saúde levando a embalagem do produto, ou ligar para o centro de intoxicação (CEATOX) através do telefone 0800-722-6001, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem.